

Інструкція із застосування медичного виробу ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ

Призначення для використання

Шприц призначений для внутрішньошкірних, підшкірних, внутрішньом'язових і внутрішньовенних ін'єкцій лікарських рідин або розчинів, введення лікарських рідин або розчинів через катетери та дренажні трубки і видалення рідини з тіла. Медичний виріб призначений для застосування кваліфікованим та спеціально навченим персоналом. При використанні слід дотримуватися заходів безпеки через можливість травматизму.

Запобіжні заходи!

- Тільки для одноразового використання.
- Не використовуйте, якщо упаковка розкрита або пошкоджена.
- Перевірте термін придатності на упаковці перед використанням.

Попередження!

- Не проводити ін'єкцію двічі тією ж голкою.
- Змішування в одному шприці різних розчинів дозволяється лише під наглядом лікаря та за рецептом.

Інструкція по проведенню ін'єкцій

- Відкрийте стерильну упаковку та дістаньте шприц із надітою голкою, дотримуючись правил асептики.
- Вставте голку надіту на шприц в ємність з медичною рідиною або розчином для ін'єкцій, тримаючи циліндр шприца, набрати необхідний обсяг медичної рідини або розчину за допомогою поршня шприца.
- Якщо використовується шприц з двома голками, набрати медичний розчин або розчин для ін'єкцій в шприц, голку відкласти в лоток для використаного матеріалу, далі дотримуючись правил асептики, вийняти другу голку з пакету, надіти на конус шприца, притерти її, тримаючись за ковпачок.
- Перед використанням випустити повітря, що міститься в шприці шляхом поступового тиску на поршень шприца.
- Обробити місце ін'єкції антисептиком.



- Зробити пацієнту ін'єкцію медичної рідини або розчину. Не проводити введення, якщо шкіра у місці ін'єкції має ознаки запалення або подразнення, або вени мають ознаки флебіту.

Інструкція по проведенню вливання

- Відкрийте стерильну упаковку та дістаньте шприц із надітою голкою, дотримуючись правил асептики.
- Вставте голку надіту на шприц в ємність з медичною рідиною або розчином для ін'єкцій, тримаючи циліндр шприца, набрати необхідний обсяг медичної рідини або розчину за допомогою поршня шприца.
- Якщо використовується шприц з двома голками, набрати медичний розчин або розчин для ін'єкцій в шприц, голку відкласти в лоток для використаного матеріалу, далі дотримуючись правил асептики, вийняти другу голку з пакету, надіти на конус шприца, притерти її, тримаючись за ковпачок.
- Перед використанням випустити повітря, що міститься в шприці шляхом поступового тиску на поршень шприца.
- Виконайте вливання медичної рідини або розчину за допомогою порту катетера або дренажної трубки, встановлених пацієнтові.

Інструкція по видаленню рідини з тіла

- Під час використання відкрийте стерильну упаковку і дістаньте шприц із надітою голкою.
- Перевірте стан голки встановленої на шприц. У разі потреби використовуйте другу голку, якщо така є.
- Виконайте медичну процедуру видалення рідини з тіла.

Термін придатності

5 років в непошкодженій упаковці.

Умови зберігання

Зберігати в сухому захищеному від прямих сонячних променів і тепла місці, в закритій тарі, при температурі від +5 °C до +40 °C (у комплекті).

Термін придатності застосовується до продукту, який правильно зберігається в непошкодженій упаковці.



UA.TR.116



Утилізація

Продукт повинен бути утилізований згідно з діючим законодавством.

Назва та адреса виробника

ТОВ «Юрія-фарм»,
Україна, 03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 10.
Тел./факс: +38 044 246-83-83
e-mail: uf@uf.ua
www.uf.ua

Адреса виробництва

Україна, 18030, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 21

Графічні символи та їх роз'яснення			
	Знак відповідності Технічному регламенту щодо медичних виробів та код органу з Оцінки відповідності		Manufacture/ Виробник
	Batch code/ Код партії		Sterile. Sterilized using Ethylene Oxide/ Стерильно. Стерилізація з використанням оксид етилену
	Date of manufacture/ Дата виготовлення		Use-by/ Використати до
	Non-Pyrogenic/ Апірогенно		Do not reuse/ Повторно використовувати заборонено
	Catalogue number / Номер за каталогом		Temperature limitation/ Температурне обмеження
	Do not use if package is damaged/ Не використовувати при пошкодженні упаковки		Keep dry/ Берегти від вологи
	Keep away from sunlight/ Берегти від прямих сонячних променів		Do not resterilize/ Повторно не стерилізувати

Дата останнього перегляду: 25.07.2018 р.

Версія: 03

