

ІНСТРУКЦІЯ **по застосуванню виробу медичного призначення**

Розчин стерильний для інгаляцій та промивання порожнини носа **LORDE (ЛОРДЕ) *hyal iso, 0,01 %***

Опис

LORDE (ЛОРДЕ) *hyal iso, 0,01 %* – засіб для інтраназального та інгаляційного застосування. Має очищаючі та зволожуючі властивості. LORDE (ЛОРДЕ) *hyal iso, 0,01 %* очищує та зволожує слизову оболонку носової порожнини як у здорових осіб, так і у пацієнтів із запальними захворюваннями органів дихання. LORDE (ЛОРДЕ) *hyal iso, 0,01 %* полегшує дихання за рахунок розрідження секрету слизової оболонки носа, придаткових пазух носа та бронхів за рахунок осмотичного ефекту, та сприяє його виведенню.

Склад LORDE (ЛОРДЕ) *hyal iso, 0,01 %*:

1 мл розчину містить:

Гіалуронат натрію 0,1 мг;

Натрію хлорид 9,0 мг.

Показання

- Щоденна гігієна носової порожнини;
- Зволоження слизової оболонки носа в умовах сухого повітря;
- Очищення слизової оболонки носа від пилу, алергенів;
- Профілактика інфекційних захворювань дихальних шляхів;
- Комплексне лікування бронхіту, бронхіоліту, муковісцидозу, бронхоектатичної хвороби для розрідження мокротиння;
- Комплексне лікування гострих та хронічних захворювань носоглотки, носової порожнини та пазух, гіпертрофії аденоїдів у дітей, цілорічного та сезонного алергічного риніту;
- Післяопераційний період після операцій на органах носової порожнини.

Механізм дії

LORDE (ЛОРДЕ) *hyal iso, 0,01 %* полегшує дихання за рахунок розрідження секрету слизової оболонки носа, придаткових пазух носа та бронхів за рахунок осмотичного ефекту, та сприяє його виведенню.

Протипоказання

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату.

Спосіб застосування та дози

LORDE (ЛОРДЕ) *hyal iso, 0,01 %* призначений для інгаляційного застосування шляхом вдихання через рот або ніс за допомогою небулайзера та інтраназального введення.

Розчин не можна вводити шляхом ін'єкцій або ковтати.

Інструкція для використання LORDE (ЛОРДЕ) *hyal iso, 0,01 %* за допомогою небулайзера

Для інгаляції використовують 2-4 мл розчину 2 рази на день. За необхідності кратність прийому може бути збільшена.

Інгаляція аерозоллю може проводитись за допомогою спеціальної лицьової маски, мундштука або назальної канюлі.

1. Підготуйте до використання небулайзер.
2. Відкрийте полімерний пакет та вийміть звідти однодозовий контейнер. Переконайтеся, що контейнер не пошкоджено. Не виймайте контейнер з пакета, якщо в цьому немає потреби.
3. Струсіть контейнер, який вийняли. Інші контейнери залиште в полімерному пакеті та помістіть їх у картонну коробку.
4. Тримавши контейнер за верхній край, поверніть інший край, щоб відкрити контейнер.
5. Вставте контейнер в небулайзер відкритим краєм вниз і легенько натисніть. Переконайтеся, що весь препарат перетік у небулайзер.
6. Зберіть небулайзер і використовуйте за призначенням.

Після використання промийте небулайзер, залишки препарату знешкодьте.

Інструкція для інтраназального введення LORDE (ЛОРДЕ) hyal iso, 0,01 %

LORDE (ЛОРДЕ) hyal iso, 0,01 % призначають:

- дітям віком від новонародженості до 7 років – по 1 - 2 краплі у кожний носовий хід 1 - 3 рази на добу;
- дітям віком від 7 до 12 років та підліткам 13 - 16 років – по 2 краплі у кожний носовий хід 2 - 4 рази на добу;
- дорослим – по 2 - 3 краплі у кожний носовий хід 3 - 6 разів на добу.

Перед застосуванням перевірити цілісність упаковки.

Перед інтраназальним введенням рекомендується очистити носові ходи.

Новонароджені: покласти дитину на бік.

Діти, дорослі: сидячи чи стоячи, голову нахилити набік. По черзі в кожний носовий хід вводять однодозовий контейнер та обережно натискають.

Уприскування необхідно провести в лівий носовий отвір, нахиливши голову праворуч та навпаки – у правий носовий отвір, нахиливши голову ліворуч. Процедуру найбільш ефективно проводити до вживання їжі.

Після процедури потрібно тримати голову прямо, щоб рідина могла вільно стікати з носа, витерти її гігієнічною серветкою.

Побічні реакції

LORDE (ЛОРДЕ) hyal iso, 0,01 %, як правило, добре переноситься. В одиничних випадках може виникати гіперемія слизової.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Протипоказань немає.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами

Не впливає.

Діти

Препарат може призначатися дітям з народження.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Не описані.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання. Зберігати в захищеному від сонячних променів місці при температурі від 5°C до 30°C

Упаковка. По 2 мл або 4 мл у контейнерах полімерних, по 10 або 30 контейнерів у пачці з картону. По 4 мл або 10 мл у флаконах скляних або полімерних, по 1 флакону у пачці з картону.

Назва та адреса виробника:

ТОВ «Юрія-Фарм» Україна 18030, м. Черкаси, вул. Вербовецького, 108.