

ІНСТРУКЦІЯ **із застосування медичного виробу**

Канюля інфузійна Венопорт плюс, одноразова

Цільове призначення

Канюля інфузійна Венопорт плюс призначена для доступу до периферичних вен, введення інфузійних розчинів та лікарських засобів.

Показання

Стани, що потребують доступу до периферичних вен, введення інфузійних розчинів та лікарських засобів.

Цільова група (популяція)

Особи, що потребують доступу до периферичних вен, введення інфузійних розчинів та лікарських засобів.

Спосіб застосування

Медичний виріб призначений для застосування кваліфікованим та спеціально навченим персоналом. Під час використання та догляду за канюлею дотримуйтесь діючих настанов та рекомендацій. Слід суворо дотримуватися заходів безпеки через можливість травмування.

Підготовка до процедури

1. Підготуйте все необхідне оснащення для проведення катетеризації периферичної вени та перевірте цілісність упаковок медичних виробів та терміни придатності.
2. Підготуйте та поставте в зоні легкої досяжності контейнер для утилізації гострих предметів.
3. Забезпечте достатнє освітлення місця катетеризації, допоможіть пацієнту зайняти зручне положення та роз'ясніть йому процедуру.
4. Оберіть Канюлю інфузійну Венопорт плюс потрібного розміру, враховуючи діаметр вени, необхідну швидкість інфузії, графік проведення внутрішньовенної терапії, та особливості інфузійних розчинів.
5. Виконайте хірургічну обробку рук у відповідності до діючих настанов та рекомендацій.
6. Підготуйте руку пацієнта для проведення процедури.

Виконання процедури

1. Одягніть маску, стерильні рукавички, захисний екран (окуляри).
2. Накладіть на 10-15 см (см) вище зони катетеризації вени гумовий джгут (на сорочку, рушник або серветку).
3. Перевірте пульс на променевій артерії. Пульсація на артерії при правильно накладеному венозному джгуті повинна зберігатися.
4. Попросіть пацієнта кілька раз стиснути і розтиснути кулак.
5. Виберіть найбільш наповнену вену у відповідності до рекомендацій.
6. Попросіть пацієнта стиснути кулак.
7. Поверхню шкіри місця катетеризації обробіть двома ватними кульками, змоченими в антисептичному розчині, відповідно до розміру пов'язки для фіксації канюлі, дайте залишкам антисептика самостійно висохнути. Після обробки антисептиком не пальпуйте вену повторно.
8. Обробіть антисептиком рукавички.
9. Покладіть на місце катетеризації стерильну серветку.
10. Після розкриття упаковки канюля повинна бути встановлена одразу. Візьміть Канюлю



11. Великим пальцем лівої руки відтягніть шкіру через стерильну серветку вниз по ходу вени. Зафіксуйте вену.
12. Виберіть найбільш доцільний кут венепункції (до 45°) в залежності від глибини розташування вени. Проведіть венепункцію. Про успішність венепункції буде свідчити поява крові спочатку між канюлею та голкою (за рахунок системи СМАРТ-СЛОТ), та трохи пізніше – в камері візуалізації. При появі крові – зменшіть кут нахилу голки-стилета і «пройдіть по вені» 2–3 mm (мм).
13. Зафіксуйте голку-стилеть в нерухомому положенні, а канюлю повільно до кінця зсувайте з голки у вену (голка повністю не видаляється із канюлі).
14. Попросіть пацієнта розтиснути кулак та зніміть джгут лівою рукою.
15. Притисніть вену кількома пальцями лівої руки вище кінчика канюлі та остаточно видаліть голку.

16. Утилізуйте голку-стилет з урахуванням правил техніки безпеки.
17. Закрийте конектор Луер-Лок канюлі заглушкою, або приєднайте інфузійну систему. Трубки інфузійної системи повинні бути щільно з'єднаними, не допускаючи протікання розчинів. Введення лікарських засобів проводиться за допомогою шприца через ін'єкційний порт, відкривши кришку. Під час введення розчину через ін'єкційний порт використовується шприц без голки. Вводити можна лише сумісні між собою лікарські засоби.
18. Промийте канюлю безпосередньо після катетеризації вени 2 ml (мл) 0,9% розчину натрію хлориду та 3 ml (мл) після фіксації. Промивати канюлю необхідно не менш, ніж 2 рази на добу, а також до і після проведення інфузії.
19. Надійно зафіксуйте канюлю, використовуючи стерильну пов'язку для фіксації канюлі з прозорим віконцем для зручності огляду місця катетеризації.

1. Зупиніть інфузію.
2. Виконайте хірургічну обробку рук у відповідності до діючих настанов та рекомендацій.
3. Одягніть стерильні рукавички.
4. Зніміть фіксуючу пов'язку, в разі необхідності попередньо змочивши антисептиком. При видаленні фіксуючої пов'язки не використовуйте ножиці.
5. Прикладіть стерильну ватну кульку, змочену антисептиком, до місця катетеризації. Повільно та обережно видаліть канюлю із вени.
6. Обережно притисніть місце катетеризації стерильним марлевим тампоном протягом 2 хвилин.
7. Місце катетеризації обробіть антисептиком та накладіть стерильну тиснучу пов'язку і зафіксуйте її. Надайте пацієнту рекомендації не знімати та не мочити місце катетеризації протягом доби.

Біль, почервоніння, припухлість, реакції підвищеної чутливості.
У разі виникнення будь-яких побічних реакцій на розчин, що вводиться, слід негайно припинити процедуру та повідомити лікаря і виробника даного розчину.



Обмеження, запобіжні заходи та застереження

- Перед використанням перевірити цілісність упаковки та термін придатності. Не використовувати виріб при пошкодженні первинної упаковки або якщо закінчився термін придатності.
- Виріб призначений тільки для одноразового застосування. Повторне використання може призвести до інфікування. Не використовуйте повторно.
- Не використовувати канюлю при наявності видимих пошкоджень та деформацій.
- Кришка ін'єкційного порту має бути закрита, коли порт не використовується!
- Регулярно контролюйте місце пункції вени. При наявності ознак запалення треба негайно вилучити канюлю.
- Утилізуйте відходи відповідно до правил техніки безпеки та місцевих вимог з утилізації медичних відходів.

Умови зберігання

Зберігати в закритій оригінальній упаковці, у сухому захищеному від сонячних променів і тепла місці при температурі від +5 °C до +40 °C. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Термін придатності

3 роки. Термін придатності діє при дотриманні умов зберігання в непошкодженій упаковці.

Назва та адреса виробника

ТОВ «Юрія-фарм», Україна, 03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 10.

Тел.: +38 (044) 246-83-83.

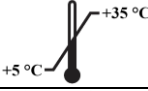
E-mail: uf@uf.ua

www.uf.ua

Адреса виробництва: Україна, 18030, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 21/13.



Графічні символи та їх роз'яснення	
	Conformity mark to the Technical regulations for medical devices and the code of the conformity assessment body/Знак відповідності Технічним регламентам щодо медичних виробів та код органу з оцінки відповідності
партія 	Batch code/Код партії
	Date of manufacture/Дата виготовлення
	Non-pyrogenic/Апірогенно
	Catalogue number/Номер за каталогом
	Do not use if package is damaged/Не використовувати при пошкодженні упаковки
	Keep away from sunlight/Берегти від сонячних променів
	Does not contain of natural rubber latex/Не містить натуральний каучуковий латекс

	Manufacturer/Виробник
 Стерильно	Sterile. Sterilized using ethylene oxide/Стерильно. Стерилізовано з використанням оксид етилену
	Use-by date/Не застосовувати після
	Do not re-use/Не використовувати повторно
	Temperature limit/Температурне обмеження
	Keep dry/Берегти від вологи
	Diethylhexyl phthalate free/Не містить діетиловихфталату

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: 14.04.2021 р.
Версія: 05.

