

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**по застосуванню інфузійної канюлі Венопорт ЮФ**

1. Оберіть **ВЕНОПОРТ ЮФ** потрібного розміру. Для внутрішньовенного введення лікарських засобів завжди обирайте найменш можливий розмір канюлі.
2. Перевірте цілісність упаковки канюлі та термін її придатності.
3. Не використовуйте канюлю якщо упаковка пошкоджена!
4. Обробіть руки антисептиком і надягніть рукавички.
5. Оберіть вену та продезінфікуйте місце установки канюлі.
6. Вийміть канюлю з упаковки.
7. Розправте крильця канюлі. Зніміть ковпачок з голки-провідника і візьміть канюлю зручним для Вас способом.
8. Послабте, але не знімайте заглушку з голки-провідника для подальшої зручності приєднання інфузійної системи.
9. Переконайтесь, що зріз голки-провідника направлений вгору.
10. Введіть канюлю під кутом 20-25<sup>0</sup> у вену і переконайтесь у правильності проколу за появою крові у проточній камері. Після візуалізації крові в проточній камері зменшить кут нахилу катетера та просуньте його трохи вперед.
11. Однією рукою введіть катетер у вену на третину довжини, другою рукою тримайте упор голки-провідника лишаючи її нерухомою. Обережно вийміть голку-провідник і введіть катетер у вену повністю.
12. **ВАЖЛИВО:** під час виймання голки не можна змінювати її орієнтацію в просторі та вводити до вени повторно!
13. Замість голки-провідника приєднайте трубку інфузійної системи або закрийте заглушкою.
14. Використану голку викиньте у спеціальний контейнер.
15. Крильця канюлі зафіксуйте до шкіри пацієнта пластирем або фіксуючою пов'язкою.
16. Місце пункції закрийте стерильною пов'язкою.
17. Введення лікарських засобів проводьте за допомогою шприца через порт, відкривши кришку.
18. Кришка має бути закрита коли порт не використовується!
19. Регулярно контролюйте місце пункції вени. При наявності ознак запалення треба негайно вилучити катетер.