

ІНСТРУКЦІЯ

по застосуванню інфузійної канюлі Ю-Флекс

1. Оберіть інфузійну канюлю **Ю-Флекс** потрібного розміру. Для внутрішньовенного введення лікарських засобів завжди обирайте найменш можливий розмір канюлі.
2. Перевірте цілісність упаковки канюлі та термін її придатності.

Не використовуйте канюлю якщо упаковка пошкоджена!

3. Обробіть руки антисептиком і надягніть рукавички.
4. Оберіть вену та продезінфекуйте місце установки канюлі.
5. Вийміть канюлю з упаковки.
6. Переконайтесь, що зажим не затиснений, а порти закриті.
7. Тримаючи голку-провідник за ручку, зніміть захисний ковпачок.
8. Введіть голку-провідник у вену.
9. Прослідкуйте за виниклою зворотною течією крові у трубці катетера.
10. Натискаючи на упор, просуньте катетер з голки далі у вену.
11. Злегка притисніть катетер, щоб стабілізувати його. Обережно вийміть голку-провідник.

ВАЖЛИВО: під час виймання голки не можна змінювати її орієнтацію в просторі та вводити до вени повторно!

12. Використану голку-провідник викиньте у спеціальний контейнер.
13. Зафіксуйте канюлю на шкірі пацієнта пластирем або фіксуючою пов'язкою.
14. Для внутрішньовенного введення лікарських засобів відкрийте зажим та використовуйте один із двох портів.

Зажим і порти мають бути закритими, якщо вони не використовуються!

15. Регулярно контролюйте місце проколу вени. При наявності ознак запалення треба негайно вилучити катетер.