

Інструкція із застосування медичного виробу ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ

Призначення для використання

Шприц призначений для виконання внутрішньошкірних, підшкірних, внутрішньом'язових і внутрішньовенних ін'єкцій кваліфікованим та спеціально навченим медичним персоналом. При використанні слід дотримуватись правил виконання даних процедур та техніки асептики і антисептики.

Інструкція по проведенню ін'єкцій

- Відкрити стерильну упаковку та дістати шприц із надітою голкою, дотримуючись правил асептики.
- Згідно призначень, набрати необхідну кількість розчину у шприц.
- Якщо використовується шприц з двома голками, набрати необхідний розчин в шприц, голку відкласти в лоток для використаного матеріалу, далі дотримуючись правил асептики, вийняти другу голку з пакету, приєднати її до конусу шприца, тримаючи за ковпачок. Перевірити щільність з'єднання. При використанні безпечної голки, відігнути ковпачок безпеки та встановити його під кутом не менше 90 градусів по відношенню до голки.
- Перед проведенням ін'єкції слід випустити повітря, що міститься в шприці, шляхом поступового тиску на поршень шприца.
- Обробити місце ін'єкції антисептиком.
- Виконати ін'єкцію згідно правил техніки її проведення.
- Не проводити введення, якщо шкіра у місці ін'єкції має ознаки інфекції, запалення або подразнення, або вени мають ознаки флебіту.

Увага! У разі потреби проведення внутрішньовенного введення розчину через периферичну венозну канюлю, при під'єднанні до додаткового ін'єкційного порту канюлі шприц застосовується без голки. Використання голки в даному випадку призведе до пошкодження клапана периферичної венозної канюлі.

Порядок дій після використання безпечної голки

- Після проведення процедури розмістити ковпачок безпеки під кутом 45 градусів по відношенню до голки.
- Великим пальцем руки різко закрити ковпачок до того моменту, поки не почується відповідний звук замикання захисного ковпачка (кляцання), що буде свідчити про те, що голка надійно заблокована всередині захисного ковпачка.
- Впевнитися, що голка повністю заблокована.

Застереження

- Не застосовувати у разі пошкодження індивідуального пакування та/або закінчення терміну придатності.
- Тільки для одноразового використання.
- Змішування в одному шприці різних розчинів дозволяється лише під наглядом лікаря та за рецептом.
- Використані голки та шприци утилізувати відповідно до місцевих вимог по утилізації відходів.

Термін придатності

5 років в непошкодженій упаковці.



Умови зберігання

Зберігати в закритій оригінальній упаковці, в сухому захищеному від прямих сонячних променів і тепла місці при температурі від + 5 °С до + 40 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Термін придатності застосовується до продукту, який зберігається з дотриманням умов в непошкодженій упаковці.

Назва та адреса виробника

ТОВ «Юрія-фарм»,
Україна, 03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 10
Тел.: +38 044 246-83-83
e-mail: uf@uf.ua

Адреса виробництва

Україна, 18030, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 21
www.uf.ua

Графічні символи та їх роз'яснення			
 UA-TR.116	Знак відповідності Технічному регламенту щодо медичних виробів та код органу з Оцінки відповідності		Manufacture/ Виробник
 партія LOT	Batch code/ Код партії	 СТЕРИЛЬНО	Sterile. Sterilized using Ethylene Oxide/ Стерильно. Стерилізація з використанням оксид етилену
	Date of manufacture/ Дата виготовлення		Use-by/ Використати до
	Non-Pyrogenic/ Апірогенно		Do not reuse/ Повторно використовувати заборонено
	Catalogue number / Номер за каталогом		Temperature limitation/ Температурне обмеження
	Do not use if package is damaged/ Не використовувати при пошкодженні упаковки		Keep dry/ Берегти від вологи
	Keep away from sunlight/ Берегти від прямих сонячних променів	 НЕ МІСТИТЬ ЛАТЕКС	Does not contain of natural rubber latex/ Не містить латекс
 НЕ МІСТИТЬ DEHP	Does not contain of DEHP/ Не містить діетилгексилфталат	 НЕ МІСТИТЬ BPA	Does not contain of BPA/ Не містить бісфенол А

Дата останнього перегляду: 16.04.2019 р.

Версія: 05

