

ІНСТРУКЦІЯ із застосування медичного виробу

ПОДОВЖУВАЧ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО КАТЕТЕРА

Склад та опис виробу:

Подовжувач перитонеального катетера – це виріб розроблений як засіб керованого доступу від перитонеального діалізного катетера до системи перитонеального діалізу (що складається з комплексу з'єднаних трубок та мішків різних типів).

Подовжувач перитонеального катетера являє собою медичний виріб, що складається з гніздового фіксованого конектору з'єднання типу Luer female, трубки, блоку з подвійного герметизуючого гвинтового роз'єму типу Luer male, осьового затискача та двох захисних ковпачків.

Виріб дозволяє з'єднати перитонеальний катетер з системою для перитонеального діалізу та контролювати потік рідини між пацієнтом та системою перитонеального діалізу за допомогою осьового затискача.

Показання.

Перитонеальний діаліз:

- хронічний амбулаторний перитонеальний діаліз;
- постійний циклічний перитонеальний діаліз;
- автоматичний перитонеальний діаліз.

Особливості використання.

Даний медичний виріб призначений для герметичного з'єднання з системою для перитонеального діалізу (що складається з комплексу з'єднаних трубок та мішків, різних типів), з адаптером катетера для перитонеального діалізу, а також з дезінфекційним ковпачком для перитонеального діалізу з повідон-йодним розчином з метою запобігання проникнення інфекції в черевну порожнину.

Крім того, може використовуватись для з'єднання/роз'єднання (при необхідності) циклічних наборів трубок та ковпачків з універсальним конектором.

Спосіб застосування:

Примітки.

Приєднання та від'єднання подовжувача повинно проводитись в стерильних умовах операційної (в ЛПЗ) кваліфікованим та спеціально навченим персоналом.

Перед використанням перевірте термін придатності медичного виробу.

Впевніться, що упаковка не пошкоджена.

При використанні даного медичного виробу дотримуйтесь асептичних умов.

Переконайтесь, що всі складові подовжувача цілі.

Забруднення будь-якої частини виробу, по якій проходить рідина, може призвести до інфікування черевної порожнини.

Крок 1.

1. Підготуйте стерильну поверхню (умови операційної та/або перев'язувальної) в ЛПЗ.
2. Надягніть маску. Вимийте та обробіть руки дезінфікуючим засобом. Одягніть стерильні рукавички.
3. Обережно, не пошкодивши медичний виріб, відкрийте пакет у місці зазначеному на упаковці та дістаньте подовжувач перитонеального катетера.

Крок 2.

Зняття відпрацьованої системи для перитонеального діалізу чи подовжувача перитонеального катетера.

4. Затисніть перитоніальний катетер. Рекомендується використовувати затискач для перитонеального діалізу.

5. Протягом не менше 1 хвилини обробіть область навколо з'єднання адаптера перитонеального катетера та трубки подовжувача перитонеального катетера (трубку системи доставки перитонеальної рідини) стерильною марлею, змоченою дезінфікуючим розчином.

6. Поверніть адаптер катетера проти годинникової стрілки, щоб зняти використаний подовжувач.

Крок 3.

Приєднання подовжувача перитонеального катетера.

7. Обробіть фіксований адаптер катетера для перитонеального діалізу дезінфікуючим розчином.

8. Візьміть подовжувач перитонеального катетера, використовуючи суху стерильну марлеву серветку. Переконайтесь, що осьовий затискач знаходиться у закритому положенні. За допомогою іншої стерильної марлевої серветки зніміть захисний ковпачок з гніздового фіксованого конектору з'єднання типу Luer female.

9. Під'єднайте, прокручуючи за годинниковою стрілкою, фіксований конектор з'єднання типу Luer female подовжувача перитонеального катетера до підготовленого адаптера катетера для перитонеального діалізу, дотримуючись стерильності.

Попередження: необхідно уникнути забруднення з'єднання типу Luer female та його блокування.

Переконайтесь в надійності з'єднання комплектуючих системи.

10. Зніміть захисний ковпачок з подвійного герметизуючого гвинтового роз'єму та захисний ковпачок з системи для перитонеального діалізу, під'єднайте конектори шляхом нагвинчування за годинниковою стрілкою, дотримуючись стерильності.

Переконайтесь в надійності з'єднання комплектуючих системи.

11. Далі, дотримуйтесь вказівок інструкції по проведенню процедури перитонеального діалізу та інструкцій до інших комплектуючих елементів системи для перитонеального діалізу.

12. За допомогою осьового затискача під час проведення перитонеального діалізу можливо контролювати потік рідин, шляхом прокручування ретракторів у взаємопротилежні сторони.

Для повного перекриття необхідно прокрутити ретрактори осьового затискача за годинниковою стрілкою до повного заглиблення пазу.

13. Після завершення заміни розчину для діалізу, та від'єднання системи для перитонеального діалізу від подовжувача перитонеального катетера, на подвійний герметизуючий гвинтовий роз'єм подовжувача накручується дезінфекційний ковпачок для перитонеального діалізу з метою попередження інфікування черевної порожнини (дивись інструкцію із застосування Дезінфекційного ковпачка для перитонеального діалізу).

Застереження.

- Рекомендований період використання становить до 6 місяців, не слід використовувати після періоду більше 6 місяців.
- Не застосовувати медичний виріб, якщо упаковка була раніше відкрита або пошкоджена, якщо захисні ковпачки відсутні.
- Неправильне з'єднання може призвести до інфікування перитонеальної

- порожнини.
- При наявності алергічних реакцій на дезінфікуючі засоби рекомендується проконсультуватись з лікарем.
 - Ні за яких умов не встановлювати повторно цей же медичний виріб після його зняття, так як повторне використання може призвести до його забруднення, порушення функціональних властивостей або структурної цілісності та інфікування.
 - Медичний виріб має бути використаний одразу ж після порушення цілісності пакування.
 - Використовуйте медичний виріб тільки за призначенням.

Увага!

Виріб не містить латексу, натурального каучуку.

Стерильно, апірогенно у випадку непошкодженої упаковки.

Метод стерилізації: стерилізовано за допомогою оксиду етилену.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі від +5 °С до +25 °С.

Уникати перегрівання.

Термін придатності: 2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності.



UA.TR.039

 <p>ТОВ «Юрія-фарм» 03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 10, Україна, Тел./факс: +38(044) 246-83-83, e-mail: uf@uf.ua</p>		Повторно використовувати заборонено		Виробник
	<p>партія</p> 	Код партії		Стерилізація з використанням оксиду етилену
Виготовлено на заводі в Китаї.		Дата виготовлення		Використати до
	 <p>UA.TR.039</p>	Знак відповідності з номером органа з оцінки відповідності		Берегти від вологи
		Не використовувати при пошкодженій упаковці		Температурне обмеження
		Берегти від сонячних променів		
		Ознайомлення з інструкцією із застосування		

Дата останнього перегляду: 14.11.2018 р.

Версія: 04.