


ІНСТРУКЦІЯ із застосування медичного виробу

Дезінфекційний ковпачок для перитонеального діалізу

Склад та опис виробу

Дезінфекційний ковпачок для перитонеального діалізу являє собою ковпачок, виготовлений з поліетилену низької щільності, внутрішня поверхня якого містить губку з повідон-йодом, що діє як дезінфікуючий засіб. Ковпачок має внутрішню різьбу (з'єднання типу Luer female) та захисну кришечку. Даний медичний виріб призначений для ізоляції герметизуючого гвинтового роз'єму подовжувача перитонеального катетера з метою запобігання інфікування з'єднань та забезпечення стерильності та апірогенності.

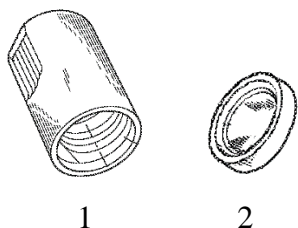

- 1 – Корпус ковпачка
2 – Захисна кришечка

Показання

Перитонеальний діаліз:

- хронічний амбулаторний перитонеальний діаліз;
- постійний циклічний перитонеальний діаліз;
- автоматичний перитонеальний діаліз.

Спосіб застосування

Медичний виріб призначений для застосування кваліфікованим та спеціально навченим персоналом, а також пацієнтами з достатнім рівнем знань та підготовки використання даного медичного виробу.


Перед використанням медичного виробу перевірте цілісність упаковки і термін придатності. Не використовуйте виріб при пошкодженні первинної упаковки або якщо закінчився термін придатності.

При використанні даного медичного виробу дотримуйтесь асептичних умов.

1. Надягніть маску. Вимийте та обробіть руки дезінфікуючим засобом.
2. Відкрийте пакет у місці зазначеному на упаковці.
3. Дістаньте дезінфекційний ковпачок для перитонеального діалізу з упаковки, зніміть захисну кришечку.

Попередження: не торкайтесь внутрішньої поверхні ковпачка та губки. Забруднення будь-якого шляху рідини системи перитонеального діалізу може призвести до інфікування черевної порожнини.

4. Переконайтесь у цілісності ковпачка. Губка на внутрішній поверхні повинна бути волога. Не слід використовувати ковпачок, при порушенні його цілісності.
5. Від'єднайте систему перитонеального діалізу (що складається з комплексу з'єднаних трубок та мішків різних типів) від подовжувача перитонеального катетера, повертаючи конектор подовжувача проти годинникової стрілки. Перед від'єднанням переконайтесь, що осьовий затискач подовжувача перитонеального катетера закритий.

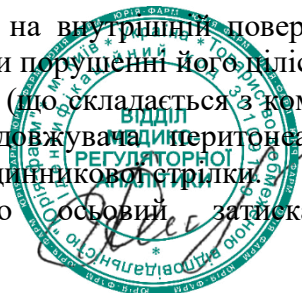

- Необхідно уникати забруднення гвинтового роз'єму на подовжувачі перитонеального катетера.
6. Обережно візьміть дезінфекційний ковпачок для перитонеального діалізу та насадіть на герметизуючий гвинтовий роз'єм подовжувача перитонеального катетера обертаючи за годинниковою стрілкою до надійного закриття.
Обережно: уникайте надмірного закручування дезінфекційного ковпачка для перитонеального діалізу.
 7. Для від'єднання необхідно прокрутити дезінфекційний ковпачок для перитонеального діалізу проти годинникової стрілки і зняти його з роз'єму подовжувача перитонеального катетера.
 8. Утилізуйте використаний ковпачок відповідно до місцевих вимог по утилізації відходів.

Застереження

- Не застосовуйте медичний виріб, якщо первинна упаковка була попередньо відкрита, пошкоджена, забруднена; якщо ковпачок пошкоджений або губка в ковпачку суха чи має кристалічну поверхню.
- Містить повідон-йод (PVP-I). Пацієнтам з індивідуальною непереносимістю та підвищеною чутливістю до йоду перед застосуванням необхідно проконсультуватись з лікарем.
Рекомендується проводити моніторинг функції щитовидної залози у пацієнтів з малим об'ємом перитонеального діалізату, зазвичай у немовлят і дітей.
- Призначений для одноразового використання. Повторне використання або повторна обробка виробу може призвести до його забруднення, порушення функціональних властивостей або структурної цілісності.
- Ковпачок має бути використаний одразу ж після порушення цілісності пакування.
- Використовувати тільки за призначенням.

Увага!

Дезінфекційний ковпачок для перитонеального діалізу апірогенний у випадку непошкодженої упаковки.

Умови зберігання

Зберігати при температурі від +5 °С до +25 °С. Зберігати в сухому, захищеному від сонячних променів місці. Уникати перегрівання. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Термін придатності

2 роки. Термін придатності діє при дотриманні умов зберігання в непошкодженій упаковці.

Назва та адреса виробника

ТОВ «Юрія-фарм», Україна, 03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 10.

Тел.: +38 (044) 246-83-83.

E-mail: uf@uf.ua

<https://www.uf.ua>












Виготовлено на заводі в Китаї.



Якщо у Вас є зауваження до медичного виробу або Ви бажаєте залишити відгук, будь ласка, скористайтесь одним із наступних способів.

- 1) надішліть лист на електронну пошту feedback@uf.ua;
- 2) надішліть текстове повідомлення за допомогою додатків Viber, Telegram або WhatsApp на номер +38 (095) 275-33-01;

3) зателефонуйте на номер +38 (095) 275-33-01 (тарифікація дзвінків згідно тарифів Вашого оператора) або +38 (0800) 401-771 (безкоштовно з будь-якого номера в Україні).

Графічні символи та їх роз'яснення	
	Manufacturer/Виробник
	Date of manufacture/Дата виготовлення
	Use-by date/Не застосовувати після
партія 	Batch code/Код партії
	Do not use if package is damaged/Не використовувати при пошкодженні упаковки
	Keep away from sunlight/Берегти від сонячних променів
	Keep dry/Берегти від вологи
	Do not re-use/Не використовувати повторно
	Consult instructions for use/Ознайомлення з інструкціями із застосування
	Temperature limit/Температурне обмеження
	Conformity mark to the technical regulations and the code of the conformity assessment body/Знак відповідності технічним регламентам та код органу з оцінки відповідності

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: 16.02.2023.

Версія: 06.

