

Рекомендації по використанню Комплект ін'єкційний, шприци 5 ml (мл) з серветками спиртовими

До складу комплекту входить:

1. Шприц 5 ml (мл) луер трьохкомпонентний ін'єкційний одноразового застосування з двома голками 0,7x38 mm (мм) (22Gx1 1/2")/0,6x32 mm (мм) (23Gx1 1/4")..... 10 шт.
2. Серветка «ВОЛЕС» із нетканого матеріалу просочена 70 % ізопропіловим спиртовим розчином, 30x60 mm (мм).....20 шт.

Призначення для використання

Комплект ін'єкційний з серветками спиртовими призначений для виконання підшкірних та внутрішньом'язових ін'єкцій кваліфікованим та спеціально навченим медичним персоналом. При використанні слід дотримуватись правил виконання даних процедур та техніки асептики та антисептики.

Рекомендації по використанню

1. Відкрити упаковку комплекту, дістати шприц та дві серветки.
2. Дотримуючись правил асептики та антисептики, відкрити індивідуальну упаковку з шприцем з попередньо надітою голкою. Обробити серветкою просоченою спиртовим розчином флакон або ампулу з медичною рідиною чи розчином для ін'єкцій.
3. Згідно з призначенням, набрати необхідну кількість розчину для ін'єкцій у шприц. Зняти зі шприца голку, що використовувалась для набору розчину та надіти іншу ін'єкційну голку з упаковки. Переконайтесь в надійності та герметичності з'єднання голки з конектором шприца. Перевірити прохідність голки шляхом поступового витискання повітря з шприца.
4. Дістати нову серветку просочену спиртовим розчином з упаковки та провести обробку місця ін'єкції. Дотримуючись правил проведення маніпуляції, провести ін'єкцію.
5. Закінчивши введення ін'єкційного засобу, притиснути до місця ін'єкції серветку просочену спиртовим розчином та швидким рухом видалити голку.

Застереження

- Не застосовувати у разі пошкодження пакування та закінчення терміну придатності.
- Тільки для одноразового використання.
- Використані матеріали утилізувати відповідно до місцевих вимог з утилізації відходів.

Термін придатності: вказаний на упаковці комплекту.

Термін придатності кожного окремого медичного виробу вказаний на індивідуальній упаковці.

Дата останнього перегляду: 02.04.2019