

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИКОРИСТАННЮ

1. Відкрити упаковку комплекту, дістати шприц та дві спиртові серветки.
2. Дотримуючись правил асептики та антисептики, відкрити індивідуальну упаковку з шприцем (попередньо надітою голкою)
3. Обробити однією з серветок флакон або ампулу з ліками чи розчином для ін'єкцій.
4. Згідно з призначенням, набрати необхідну кількість розчину для ін'єкцій у шприц.
5. Зняти з шприца голку, що використовувалась для набору розчину ліків та надіти іншу – ін'єкційну голку з упаковки.
6. Переконатись в надійності та герметичності з'єднання павільйона голки з конектором шприца.
7. Перевірити прохідність голки шляхом поступового витискання повітря (рідини) з шприца.
8. Дістати нову серветку з упаковки та провести обробку місця ін'єкції.
9. Дотримуючись правил проведення маніпуляції, провести ін'єкцію.
10. Закінчивши введення ін'єкційного засобу, притиснути до місця ін'єкції серветку та швидким рухом видалити голку.