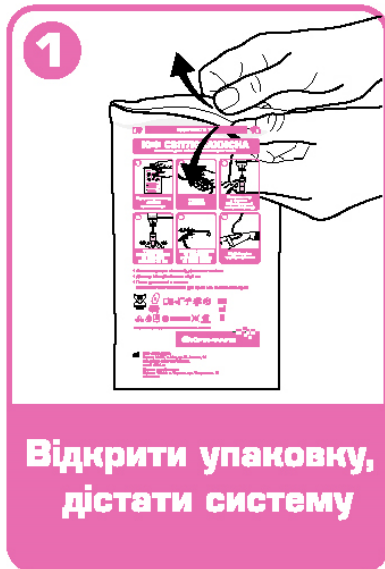


ІНСТРУКЦІЯ
із застосування медичного виробу

ЮФ СВІТЛОЗАХИСНА СИСТЕМА ДЛЯ ВЛИВАННЯ КРОВОЗАМІННИКІВ ТА ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ БЕЗ ДЕГФ



Показання

Внутрішньовенне введення лікарських засобів та світлочутливих розчинів.

Протипоказання

Підвищена індивідуальна чутливість до будь-якого з компонентів медичного виробу.

Спосіб застосування

Процедура повинна виконуватись кваліфікованим медичним персоналом, що володіє технікою та допущений до проведення інфузійної терапії.

1. Дотримуючись правил асептики розкрити індивідуальну упаковку, вийняти систему і покласти на стерильний столик.



Назва та адреса виробника

ТОВ «Юрія-фарм», Україна, 03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 10.

Тел.: +38 (044) 246-83-83.

E-mail: uf@uf.ua

www.uf.ua











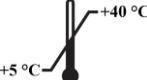

Адреса виробництва: Україна, 18030, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 21/13.










UA.TR.116

Якщо у Вас є зауваження до медичного виробу або Ви бажаєте залишити відгук, будь ласка, скористайтесь одним із наступних способів:

- 1) надішліть лист на електронну пошту feedback@uf.ua;
- 2) надішліть текстове повідомлення за допомогою додатків Viber, Telegram або WhatsApp на номер +38 (095) 275-33-01;
- 3) зателефонуйте на номер +38 (095) 275-33-01 (тарифікація дзвінків згідно тарифів Вашого оператора) або +38 (0800) 401-771 (безкоштовно з будь-якого номера в Україні).

| Графічні символи та їх роз'яснення | |
|--|---|
|  | Conformity mark to the technical regulations and the code of the conformity assessment body/Знак відповідності технічним регламентам та код органу з оцінки відповідності |
| партія  | Batch code/Код партії |
|  | Date of manufacture/Дата виготовлення |
|  | Non-pyrogenic/Апірогенно |
|  | Catalogue number/Номер за каталогом |
|  | Do not use if package is damaged/Не використовувати при пошкодженні упаковки |
|  | Keep away from sunlight/Берегти від сонячних променів |
|  | Manufacturer/Виробник |
|  | Sterile. Sterilized using ethylene oxide/Стерильно. Стерилізовано з використанням оксид етилену |
|  | Use-by date/Не застосовувати після |
|  | Do not re-use/Не використовувати повторно |
|  | Temperature limit/Температурне обмеження |
|  | Keep dry/Берегти від вологоти |



| | |
|---|---|
|  НЕ МІСТИТЬ DEHP | Diethylhexyl phthalate free/Не містить діетилгексилфталату |
|  НЕ МІСТИТЬ ЛАТЕКС | Does not contain of natural rubber latex/Не містить натуральний каучуковий латекс |
|  | Tube length 150 cm/Довжина трубки 150 см |
|  | Liquid filter with pore size/Фільтр рідини з розміром пор |
|  | Drops per millilitre/Крапель на мілілітр |
|  | Use only for gravity infusion/Використовувати тільки для гравітаційної інфузії |
|  | Contains fixing tape/Містить фіксуючу стрічку |

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: 09.02.2023.
Версія: 05.

