

ІНСТРУКЦІЯ **із застосування медичного виробу**

Розчин стерильний для інгаляційного та інтраназального введення **Breather Barrier (Брізер Бар'єр)**

Склад

1 ml (мл) розчину містить: натрію хлорид – 9,0 mg (мг).

Вміст пакування

По 4 ml (мл) у контейнерах полімерних, по 10 контейнерів у пачці з картону.

Опис

Breather Barrier (Брізер Бар'єр) – розчин стерильний для інгаляційного та інтраназального введення. Це природний, ізотонічний сольовий розчин в концентрації, яка адаптована для сумісності з рідиною організму людини. Застосовується для зволоження та очищення верхніх дихальних шляхів від алергенів, мікроорганізмів і пилу, в тому числі для використання в інгаляційній системі Breather AirOx (Брізер АйрОкс).

Цільове призначення

Breather Barrier (Брізер Бар'єр) призначений для зволоження та очищення верхніх дихальних шляхів.

Показання до застосування

Для гігієнічного догляду, зволоження та очищення слизової оболонки верхніх дихальних шляхів в приміщеннях з сухим повітрям, зумовленим роботою кондиціонерів (в тому числі автомобільних), обігрівачів, радіаторів центрального опалення, під час повітряних перельотів, від алергенів в період цвітіння рослин, пилу, наявного в умовах забрудненого повітря. Для використання у хворих з захворюваннями слизової оболонки носа та додаткових пазух, що супроводжуються сухістю слизової оболонки або утворенням слизу (атрофічний, алергічний, інфекційний, медикаментозний риніти).

Як допоміжний засіб при застосуванні локальних судинозвужувальних засобів.

Після операційних втручань у порожнині носа та носових пазухах.

Також можна використовувати для розведення інгаляційних лікарських засобів згідно з інструкцією виробника.

Протипоказання

Підвищена індивідуальна чутливість до будь-якого з компонентів медичного виробу.

Цільова група (популяція)

Немовлята, діти та дорослі, що потребують зволоження та очищення верхніх дихальних шляхів.

Спосіб застосування

Використання за допомогою інгаляційної системи Breather AirOx (Брізер АйрОкс)

Інгаляцію розчину Breather Barrier (Брізер Бар'єр) проводити за допомогою інгаляційної системи Breather AirOx (Брізер АйрОкс) з використанням спеціальної маски на обличчя, загубника або назальної канюлі. Перед проведенням процедури обов'язково ознайомтеся з інструкцією із застосування інгаляційної системи. Дотримуйтесь правил експлуатації інгаляційної системи Breather AirOx (Брізер АйрОкс).

1. Підготуйте до використання інгаляційну систему Breather AirOx (Брізер АйрОкс).



2. Відкрийте пакет з фольги та відокремте однодозовий контейнер. Переконайтеся, що контейнер не пошкоджено.
3. Струсіть контейнер, який відокремили. Інші контейнери залиште у пакеті з фольги та помістіть їх у картонну коробку. Не виймайте контейнери з пакета, якщо в цьому немає потреби.
4. Тримавши контейнер за верхній край, поверніть інший край, щоб відкрити контейнер.
5. Вставте контейнер в інгаляційну систему Breathe AirOx (Брізер АйрОкс) відкритим краєм вниз і легенько натисніть. Переконайтеся, що весь розчин перетік у резервуар приладу.
6. Закрийте резервуар системи Breathe AirOx (Брізер АйрОкс) і використовуйте за призначенням.

Після використання промийте інгаляційну систему Breathe AirOx (Брізер АйрОкс), залишки розчину утилізуйте.

Інтраназальне введення

Дорослим – по 2 краплі; дітям віком від 1 року – по 1–2 краплі; дітям до 1 року – по 1 краплі у кожен носовий хід 3–4 рази на добу з терапевтичною метою, з гігієнічною метою – 1–4 рази на добу.

Застосовувати до 4 тижнів.

Спосіб застосування для дорослих: перед початком процедури слід вимити руки з милом та акуратно звільнити носові ходи від секрету швидким різким видихом через ніс. Для попередження витікання розчину необхідно лягти або сісти та закинути голову назад, потім закапати розчин. При закапуванні розчину у правий носовий хід голова має бути закинута трохи назад та нахилена ліворуч і, навпаки, голова має бути нахилена праворуч при закапуванні розчину у лівий носовий хід. Після закапування бажано побути в положенні лежачи із закинutoю назад головою протягом 2 хвилин, після чого звільнити носові ходи від розрідженого секрету. Залишки розчину на обличчі слід витерти серветкою.

Спосіб застосування для дітей: перед початком процедури слід вимити руки з милом та акуратно звільнити носові ходи дитини від секрету. Після очищення носа від секрету закапати розчин у кожен носовий хід. При закапуванні розчину у правий носовий хід голова дитини має бути закинута трохи назад та нахилена ліворуч і, навпаки, голова дитини має бути нахилена праворуч при закапуванні розчину у лівий носовий хід. Після закапування дитині бажано побути в положенні лежачи із закинutoю назад головою протягом 2 хвилин, після чого слід посадити дитину та допомогти їй звільнити носові ходи від розрідженого секрету. Залишки розчину на обличчі слід витерти серветкою.

Для розведення інгаляційних лікарських засобів використовують 2–4 ml (мл) розчину. Використовувати для розведення лише тих лікарських засобів, в інструкції до яких вказано можливість розведення фізіологічним розчином 0,9 % натрію хлориду.

Побічні реакції

В осіб з індивідуальною непереносимістю компонентів медичного виробу можливі реакції підвищеної чутливості. У разі виникнення будь-яких побічних реакцій слід негайно припинити використання медичного виробу та повідомити лікаря і виробника.

Обмеження, запобіжні заходи та застереження

- Розчин призначений для використання тільки шляхом інгаляційного або інтраназального введення. Використовуйте виріб відповідно до інструкції із застосування. Проконсультуйтеся з лікарем перед застосуванням, якщо у Вас є питання.
- Дітям застосовувати під наглядом дорослих.



- Перед використанням медичного виробу перевірте цілісність упаковки і термін придатності. Не використовуйте виріб при пошкодженні первинної упаковки або якщо закінчився термін придатності.
- Виріб призначений тільки для одноразового застосування. Повторне використання може призвести до інфікування. Не використовуйте повторно.
- Утилізувати відповідно до місцевих вимог з утилізації медичних відходів.

Умови зберігання

Зберігати в захищеному від сонячних променів місці при температурі від +5 °C до +30 °C. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Термін придатності

2 роки. Термін придатності діє при дотриманні умов зберігання в непошкодженій упаковці.

Назва та адреса виробника

ТОВ «Юрія-фарм», Україна, 03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 10.

Тел.: +38 (044) 275-92-42, +38 (044) 275-01-08.

E-mail: uf@uf.ua

www.uf.ua

Адреса виробництва: Україна, 18030, м. Черкаси, вул. Кобзарська, 108.



Якщо у Вас є зауваження до медичного виробу або Ви бажаєте залишити відгук, будь ласка, скористайтесь одним із наступних способів:

- 1) надішліть лист на електронну пошту feedback@uf.ua;
- 2) надішліть текстове повідомлення за допомогою додатків Viber, Telegram або WhatsApp на номер +38 (095) 275-33-01;
- 3) зателефонуйте на номер +38 (095) 275-33-01 (тарифікація дзвінків згідно тарифів Вашого оператора) або +38 (0800) 401-771 (безкоштовно з будь-якого номера в Україні).

Графічні символи та їх роз'яснення	
	Sterile medical device in primary packaging. Sterilized using steam or dry heat/Стерильний медичний виріб в первинному пакуванні. Стерилізовано з використанням пару чи сухого жару
	Do not use if package is damaged/Не використовувати при пошкодженні упаковки
	Do not re-use/Не використовувати повторно
	Consult instructions for use/Ознайомлення з інструкціями із застосування
	Manufacturer/Виробник
	Temperature limit/Температурне обмеження
	Date of manufacture/Дата виготовлення
	Use-by date/Не застосовувати після

партія 	Batch code/Код партії
 UA.TR.099	Conformity mark to the technical regulations and the code of the conformity assessment body / Знак відповідності технічним регламентам та код органу з оцінки відповідності

Дата останнього перегляду інструкції з застосування: 18.12.2022.
Версія: 03.

