

ИНСТРУКЦИЯ
по применению медицинского изделия
раствор стерильный для ингаляционного и интраназального введения
Breather Barrier (Бризер Барьер)

Описание

Breather Barrier (Бризер Барьер) – раствор стерильный для ингаляционного и интраназального введения. Это естественный, изотонический солевой раствор в концентрации, которая адаптирована для совместимости с жидкостями организма человека.

Применяется для увлажнения и очистки верхних дыхательных путей от аллергенов, микроорганизмов и пыли, в том числе для использования в ингаляционной системе Breather AirOx (Бризер АйрОкс).

Содержание упаковки

По 4 ml (мл) в контейнерах полимерных, по 10 контейнеров в пачке из картона.

Состав: 1 ml (мл) раствора содержит: натрия хлорид – 9,0 mg (мг).

Показания к применению

Разрешается применять младенцам, детям и взрослым.

Для гигиенического ухода, увлажнения и очищения слизистой оболочки верхних дыхательных путей в помещениях с сухим воздухом, обусловленным работой кондиционеров (в том числе автомобильных), обогревателей, радиаторов центрального отопления, при воздушных перелетах, от аллергенов в период цветения растений, пыли в условиях загрязненного воздуха. Для использования у больных с заболеваниями слизистой оболочки носа и придаточных пазух, сопровождающихся сухостью слизистой оболочки или образованием слизи (атрофический, аллергический, инфекционный, медикаментозный ринит).

Как вспомогательное средство при применении локальных сосудосуживающих средств.

После операционных вмешательств в полости носа и носовых пазухах.

Также можно использовать для разведения ингаляционных лекарственных средств в соответствии с инструкцией производителя.

Противопоказания

Breather Barrier (Бризер Барьер) противопоказан при повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам изделия.

Способ применения и дозы

Использование с помощью ингаляционной системы Breather AirOx (Бризер АйрОкс)

Ингаляцию раствора можно проводить с помощью ингаляционной системы Breather AirOx (Бризер АйрОкс) с использованием специальной маски на лицо, загубника или назальной канюли.

При применении детям (от рождения): использовать от 1 до 4 ml (мл) раствора. Доза, продолжительность и частота применения определяется врачом.

При применении взрослым: использовать по одному контейнеру 2 раза в день. При необходимости частота использования может быть увеличена до 4 раз в день.

1. Подготовьте к использованию ингаляционную систему Breather AirOx (Бризер АйрОкс).
2. Откройте пакет из фольги и отделите однодозовый контейнер. Убедитесь, что контейнер не был поврежден.
3. Встряхните контейнер, который отделили. Другие контейнеры оставьте в пакете из фольги и поместите их в картонную коробку. Не извлекайте контейнеры из пакета, если в этом нет необходимости.
4. Держа контейнер за верхний край, поверните другой край, чтобы открыть контейнер.
5. Установите контейнер в ингаляционную систему Breather AirOx (Бризер АйрОкс) открытым краем вниз и слегка нажмите. Убедитесь, что весь раствор перетек в резервуар прибора.
6. Закройте резервуар системы Breather AirOx (Бризер АйрОкс) и используйте по назначению.

После использования промойте ингаляционную систему Breather AirOx (Бризер АйрОкс), остатки раствора утилизировать в соответствии с местными требованиями по утилизации медицинских отходов.

Интраназальное введение

Взрослым – по 2 капли; детям в возрасте от 1 года – по 1-2 капли; детям до 1 года – по 1 капле в каждый носовой ход 3-4 раза в сутки в терапевтических целях, с гигиенической целью – 1-4 раза в сутки.

Применять до 4 недель.

Способ применения для взрослых: перед началом процедуры следует вымыть руки с мылом и аккуратно освободить носовые ходы от секрета быстрым резким выдохом через нос. Для предотвращения утечки раствора необходимо лечь или сесть и запрокинуть голову назад, затем закапать раствор. При закапывании раствора в правый носовой ход голова должна быть запрокинута немного назад и наклонена влево и, наоборот, голова должна быть наклонена вправо при закапывании раствора в левый носовой ход. После закапывания желательно побыть в положении лежа с запрокинутой назад головой в течение 2 минут, после чего освободить носовые ходы от разреженного секрета. Остатки раствора на лице следует вытереть салфеткой.

Способ применения для детей: перед началом процедуры следует вымыть руки с мылом и аккуратно освободить носовые ходы ребенка от секрета. После очистки носа от секрета закапать раствор в каждый носовой ход. При закапывании раствора в правый носовой ход голова ребенка должна быть запрокинута немного назад и наклонена влево и, наоборот, голова ребенка должна быть наклонена вправо при закапывании раствора в левый носовой ход. После закапывания ребенку желательно побыть в положении лежа с запрокинутой назад головой в течение 2 минут, после чего следует посадить ребенка и помочь ему освободить носовые ходы от разреженного секрета. Остатки раствора на лице следует вытереть салфеткой.

Для разведения ингаляционных лекарственных средств используют 2-4 ml (мл) раствора. Использовать для разведения только тех лекарственных средств, в инструкции к которым указано возможность разведения физиологическим раствором 0,9% натрия хлорида.

Побочные реакции

У лиц с индивидуальной непереносимостью компонентов раствора возможные реакции повышенной чувствительности. В редких случаях могут возникать гиперемия слизистой оболочки носа, головокружение, кашель или бронхоспазм.

Меры безопасности

Раствор предназначен для применения только путем ингаляционного или интраназального введения. Используйте изделие в соответствии с инструкцией по применению. Проконсультируйтесь с врачом перед применением, если у Вас есть вопросы.

Использование детьми должно проходить под наблюдением взрослых!

При возникновении каких-либо побочных эффектов, использование медицинского изделия следует немедленно прекратить и обратиться к врачу.

Не использовать изделие, если контейнер был поврежден.

Не использовать изделие по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Не смешивать с другими растворами или лекарственными средствами!

Не использовать повторно. Изделие предназначено для одноразового применения.

Срок годности: 2 года. Срок годности действует при соблюдении условий хранения в оригинальной упаковке.

Условия хранения

Хранить в защищенном от солнечных лучей месте при температуре от + 5 °С до + 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Название и адрес производителя

ООО «Юрия-Фарм», Украина, 03038, г. Киев, ул. Н. Амосова, 10.

Тел.: +38 (044) 275-92-42, +38 (044) 275-01-08.

E-mail: uf@uf.ua

Адрес производства: Украина, 18030, г. Черкассы, ул. Кобзарская, 108.

Дата создания: 12.11.2020 г. Версия: 01