

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**із застосування медичного виробу**  
**Розчин стерильний для інгаляційного та інtranазального введення**  
**Breather Treat (Брізер Тріт)**

**Опис**

Breather Treat (Брізер Тріт) - розчин стерильний для інгаляційного та інtranазального введення, який полегшує дихання шляхом розрідження та покращення виведення секрету слизової оболонки верхніх та нижніх дихальних шляхів у пацієнтів із запальними захворюваннями органів дихання за рахунок осмотичного ефекту. Розчин стимулює захисні властивості слизових оболонок верхніх дихальних шляхів завдяки здатності активно розріджувати і виводити виділення, які утворюються під час інфекційних та алергічних захворювань. Застосовується в комплексній терапії захворювань дихальних шляхів, в тому числі з використанням інгаляційної системи Breather AirOx (Брізер АйрОкс).

**Вміст пакування**

По 4 ml (мл) у контейнерах полімерних, по 10 контейнерів у пачці з картону.

**Склад:**

1 ml (мл) розчину містить: натрію хлорид – 30,0 mg (мг).

**Показання до застосування**

Показаний хворим з ГРВІ, грипом, ларингітами, трахеїтами, бронхітами, бронхіолітами, муковісцидозом, бронхеоктатичною хворобою та хронічними обструктивними захворюваннями легень. Також застосовується при гострих та хронічних захворюваннях носоглотки, носової порожнини та пазух, гіпертрофії аденоїдів у дітей, цілорічного та сезонного алергічного риніту для зменшення набряку слизової оболонки, розрідження секрету та полегшення дихання.

**Протипоказання**

Breather Treat (Брізер Тріт) протипоказаний при підвищенні індивідуальної чутливості до компонентів виробу.

**Способ застосування та дози**

*Використання за допомогою інгаляційної системи Breather AirOx (Брізер АйрОкс)*

Інгаляцію розчину можна проводити за допомогою інгаляційної системи Breather AirOx (Брізер АйрОкс) з використанням спеціальної маски на обличчя, загубника або назальної канюлі.

*При застосуванні дітям (від народження):* використовувати від 1 до 4 ml (мл) розчину. Доза, тривалість та частота застосування визначається лікарем.

*При застосуванні дорослим:* використовувати по одному контейнеру 2 рази на день. За необхідності частота використання може бути збільшена до 4 разів на день.

1. Підготуйте до використання інгаляційну систему Breather AirOx (Брізер АйрОкс).
2. Відкрийте пакет з фольги та відокремте однодозовий контейнер. Переконайтесь, що контейнер не пошкоджено.
3. Струсіть контейнер, який відокремили. Інші контейнери залиште у пакеті з фольги та помістіть їх у картонну коробку. Не виймайте контейнери з пакета, якщо в цьому немає потреби.
4. Тримаючи контейнер за верхній край, поверніть інший край, щоб відкрити контейнер.
5. Вставте контейнер в інгаляційну систему Breather AirOx (Брізер АйрОкс) відкритим краєм вниз і легенько натисніть. Переконайтесь, що весь розчин перетік у резервуар приладу.
6. Закройте резервуар системи Breather AirOx (Брізер АйрОкс) і використовуйте за призначенням.

Після використання промийте інгаляційну систему Breather AirOx (Брізер АйрОкс), залишки розчину утилізуйте відповідно до місцевих вимог по утилізації медичних відходів.

**Інtranазальне введення**

Дорослим – по 3 краплі; дітям – по 1-2 краплі у кожен носовий хід 3-4 рази на добу.

Способ застосування для дорослих: перед початком процедури слід вимити руки з милом та акуратно звільнити носові ходи від секрету швидким різким видихом через ніс. Для попередження витікання розчину необхідно лягти або сісти та закинути голову назад, потім закапати розчин. При закапуванні розчину у правий носовий хід голова має бути закинута трохи назад та нахиlena ліворуч і, навпаки, голова має бути нахиlena праворуч при закапуванні розчину у лівий носовий хід. Після закапування бажано побути в положенні лежачі із закинутою назад головою протягом 2 хвилин, після чого звільнити носові ходи від розрідженого секрету. Залишки розчину на обличчі слід витерти серветкою.

Способ застосування для дітей: перед початком процедури слід вимити руки з милом та акуратно звільнити носові ходи дитини від секрету. Після очищення носа від секрету закапати розчин у кожен носовий хід. При

закапуванні розчину у правий носовий хід голова дитини має бути закинута трохи назад та нахилена ліворуч і, навпаки, голова дитини має бути нахилена праворуч при закапуванні розчину у лівий носовий хід. Після закапування дитині бажано побуди в положенні лежачи із закинутою назад головою протягом 2 хвилин, після чого слід посадити дитину та допомогти їй звільнити носові ходи від розрідженої секрету. Залишки розчину на обличчі слід витерти серветкою.

### Побічні реакції

В осіб з індивідуальною непереносимістю компонентів розчину можливі реакції підвищеної чутливості. В поодиноких випадках можуть виникати гіперемія слизової оболонки носа, запаморочення, кашель або бронхоспазм.

### Заходи безпеки

Розчин призначений для застосування тільки шляхом інгаляційного або інtranазального введення. Використовуйте виріб відповідно до інструкції із застосування. Проконсультуйтесь з лікарем перед застосуванням, якщо у Вас є питання.

Використання дітьми повинно проходити під наглядом дорослих!

При виникненні будь-яких побічних ефектів, використання медичного виробу слід негайно припинити та звернутися до лікаря.

Не використовувати виріб, якщо контейнер був пошкоджений.

Не використовувати виріб після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Не змішувати з іншими розчинами або лікарськими засобами!

Не використовувати повторно. Виріб призначений для одноразового застосування.

**Термін придатності:** 2 роки. Термін придатності діє при дотриманні умов зберігання в оригінальній упаковці.



UA.TR.039

### Умови зберігання

Зберігати в захищеному від сонячних променів місці при температурі від +5 °C до +30 °C. Зберігати у недоступному для дітей місці.

### Назва та адреса виробника

ТОВ «Юрія-фарм», Україна, 03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 10.

Тел.: +38 (044) 275-92-42, +38 (044) 275-01-08.

E-mail: uf@uf.ua

www.uf.ua

Адреса виробництва: Україна, 18030, м. Черкаси, вул. Кобзарська, 108.

### Графічні символи та їх роз'яснення

	Sterile medical device in primary packaging/ Стерильний медичний виріб в первинному пакуванні
	Do not use if package is damaged/ Не використовувати при пошкодженні упаковки
	Do not re-use/Не використовувати повторно
	Consult instructions for use/ Ознайомлення з інструкціями із застосування
	Manufacturer/Виробник
	Temperature limit/Температурне обмеження
	Date of manufacture/Дата виготовлення
	Use-by date/Використати до
	Batch code/Код партії
	Conformity mark to the Technical regulation for medical devices and the code of the conformity assessment body/ Знак відповідності Технічному регламенту щодо медичних виробів та код органу з оцінки відповідності UA.TR.039

Дата створення: 12.11.2020 р.

Версія: 01.

ВІДДІЛ  
УПРАВЛІННЯ  
КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ  
11.11.2020