

ИНСТРУКЦИЯ по применению медицинского изделия

Спрей назальный SNOTTY (СНОТТИ)

Состав

1 ml (мл) спрея содержит: ксилитол – 120 mg (мг), натрия хлорид – 9 mg (мг), бензалкония хлорид – 0,2 mg (мг), вода очищенная – до 1 ml (мл).

Содержимое упаковки

Спрей назальный во флаконе 30 ml (мл) с распылителем, № 1.

Описание

SNOTTY (СНОТТИ) – назальный спрей, который очищает носовые ходы и пазухи, удаляя загрязняющие и раздражающие вещества. SNOTTY (СНОТТИ) быстро устраняет заложенность носа при респираторных инфекциях верхних дыхательных путей и аллергиях.

Ксилитол является основным компонентом медицинского изделия. В условиях снижения pH он стабилизирует белковые структуры клеток. Благодаря осмолитическим свойствам регулирует солевой обмен на поверхности слизистой носа и носоглотки. Высокая концентрация ксилитола (12 %) осложняет адгезию (прилипание) микроорганизмов к клеткам слизистой, препятствует образованию биопленок, оказывает антимикробное влияние на некоторые виды патогенов.

Ксилитол разжижает и облегчает выведение слизи, удерживает влагу, благодаря чему увлажняет и успокаивает раздраженную слизистую носа, облегчает дыхание и улучшает качество сна у пациентов с острым и хроническим течением инфекционных и аллергических заболеваний полости носа, придаточных пазух и носоглотки. Наличие ксилитола обуславливает сладкий вкус.

Концентрация компонентов медицинского изделия обуславливает гипертоничность раствора, благодаря чему помогает выводить избыток влаги и устранять отек слизистой носовых ходов и пазух.

Составляющие медицинского изделия не вступают в реакции с организмом человека и инертны к нему, не оказывают фармакологического, иммунобиологического и метаболического действия.

Нестерильно.

Целевое назначение

SNOTTY (СНОТТИ) – спрей для интраназального введения, облегчающий дыхание путем очищения, разжижения и улучшения выведения секрета.

Показания

В качестве дополнительного средства при инфекционных и аллергических заболеваниях полости носа, придаточных пазух и носоглотки.

Как средство, способствующее удалению назального секрета и устранению заложенности носа при затрудненном носовом дыхании.

Для ежедневной гигиены полости носа.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам медицинского изделия.

Целевая группа (популяция)

Дети от 6 месяцев и взрослые.

Способ применения

Перед первым использованием снять стоппер с флакона.

Использовать 2 раза в сутки – утром и вечером. При необходимости кратность приема может быть увеличена. Продолжительность использования определяют индивидуально.

Использование детьми должно осуществляться под наблюдением или с помощью взрослых.

Способ применения для взрослых:

- 1) перед началом процедуры следует вымыть руки с мылом и осторожно освободить носовые ходы от секрета быстрым резким выдохом через нос, блокируя один носовой ход пальцем;
- 2) снять защитный колпачок с флакона, вставить наконечник в носовой ход и выполнить 2–4 впрыска (дышать при этом через рот или задержать дыхание на вдохе), при впрыскивании в правый носовой ход голова должна быть запрокинута немного назад и наклонена влево, и наоборот, голова должна быть наклонена вправо при впрыскивании спрея в левый носовой ход;
- 3) повторить для другого носового хода;
- 4) очистить с помощью чистой салфетки наконечник флакона и надеть защитный колпачок;
- 5) после впрыскивания спрея желательно побыть в положении лежа с запрокинутой назад головой в течение 2 минут, после чего освободить носовые ходы от разреженного секрета.

Способ применения для детей:

- 1) перед началом процедуры следует вымыть руки с мылом и осторожно освободить носовые ходы ребенка от секрета;
- 2) снять защитный колпачок с флакона, вставить наконечник в носовой ход (действуйте осторожно во избежание травмирования) и выполнить 2–4 впрыскивания (при этом следует предложить ребенку дышать через рот или задержать дыхание на вдохе), при впрыскивании в правый носовой ход голова ребенка должна быть запрокинута немного назад и наклонена влево, и наоборот, голова ребенка должна быть наклонена вправо при впрыскивании спрея в левый носовой ход;
- 3) повторить для другого носового хода;
- 4) очистить с помощью чистой салфетки наконечник флакона и надеть защитный колпачок;
- 5) после впрыскивания спрея ребенку желательно побыть в положении лежа с запрокинутой назад головой в течение 2 минут, после чего следует посадить ребенка, чтобы он держал голову прямо, и помочь ему освободить носовые ходы от разреженного секрета.

Побочные реакции

Реакции повышенной чувствительности, раздражение или отек слизистой полости носа.

При возникновении каких-либо побочных реакций следует немедленно прекратить использование медицинского изделия и сообщить врачу и производителю.

Ограничения, меры предосторожности и предупреждения

- Используйте SNOTTY (СНОТТИ) в соответствии с инструкцией по применению. Не используйте иные способы, отличные от изложенных в данном руководстве по применению

медицинского изделия. Проконсультируйтесь с врачом перед применением, если у вас есть вопросы.

- Не используйте один флакон для нескольких пациентов. Использование одного флакона более чем одним человеком может вызвать распространение инфекции.
- Не используйте одновременно с другими средствами для интраназального введения. При необходимости интраназального применения другого медицинского изделия или лекарственного средства следует сделать промежуток между их использованием не менее 15 минут.
- Не нагревайте флакон. При хранении в холодильнике перед применением следует выдержать изделие в течение 15–30 минут при комнатной температуре.
- Не смешивайте с какими-либо растворами, лекарственными средствами и т. п.
- Отсутствуют доступные клинические данные об эффективности и переносимости медицинского изделия в период беременности и кормления грудью. Этой категории пациентов следует проконсультироваться с лечащим врачом перед применением медицинского изделия.
- Упаковка медицинского изделия содержит небольшие пластиковые детали, которые могут проглотить маленькие дети. Во избежание опасности аспирации медицинское изделие следует хранить в недоступном для детей месте.
- Перед использованием медицинского изделия проверьте целостность упаковки и срок годности. Не используйте изделие, если повреждена первичная упаковка или истек срок годности.
- Утилизировать в соответствии с местными требованиями по утилизации отходов.

Несовместимость

Не обнаружено.

Передозировка

О случаях передозировки не сообщалось.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке в защищенном от солнечных лучей месте при температуре до +25 °С. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Срок годности действителен при соблюдении условий хранения в оригинальной упаковке.

Срок годности после вскрытия упаковки – 6 месяцев.

Название и адрес производителя

ООО «Юрия-Фарм», Украина, 03038, г. Киев, ул. Н. Амосова, 10.

Тел.: +38 (044) 275-92-42, +38 (044) 275-01-08.

E-mail: uf@uf.ua

www.uf.ua





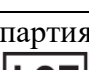


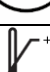

Адрес производства: Украина, 18030, г. Черкассы, ул. Кобзарская, 108.

Тел.: +38 (044) 281-01-01.



Если у вас есть замечания к медицинскому изделию или вы хотите оставить отзыв, пожалуйста, воспользуйтесь одним из следующих способов:

- 1) отправьте письмо на электронную почту feedback@uf.ua;
- 2) отправьте текстовое сообщение с помощью приложений Viber, Telegram или WhatsApp на номер +38 (095) 275-33-01;
- 3) позвоните по телефону +38 (095) 275-33-01 (тарификация звонков согласно тарифам вашего оператора) или +38 (0800) 401-771 (бесплатно с любого номера в Украине).

Графические символы и их разъяснение	
	Manufacturer/Производитель
	Date of manufacture/Дата изготовления
	Consult instructions for use/Ознакомление с инструкциями по применению
	Caution/Предостережение
партия 	Batch code/Код партии
	Use-by date/Не применять после
	Do not use if package is damaged/Не использовать при повреждении упаковки
	Upper limit of temperature/Верхний предел температуры
	Conformity mark to the technical regulations/Знак соответствия техническим регламентам

Дата последнего пересмотра инструкции по применению: 31.05.2023.

Версия: 03.