

Инструкция по применению СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ СНОТТИ ОРОШЕНИЕ (SNOTTY IRRIGATION)

Состав

Натуральная морская вода: 21%; ксилитол: 11%; очищенная вода.

Без консервантов.

Содержимое упаковки

Спрей назальный во флаконе 125 мл (ml) с насадкой-распылителем ДУО (DUO), создающей два варианта распыления: мягкое (мелкодисперсный туман) и сильное (струя).

Инструкция по применению медицинского изделия.

Описание и свойства

Спрей назальный СНОТТИ ОРОШЕНИЕ (SNOTTY IRRIGATION) – это 11% раствор ксилитола на основе 100% натурального раствора морской воды из чистейшего региона Франции: Бретань, Канкаль-Суд.

Морская вода содержит природные минералы и микроэлементы.

Показан для ежедневного гигиенического ухода, очищения и увлажнения слизистой оболочки носа, разжижения и улучшения выведения секрета, улучшения функции мерцательного эпителия и очищения слизистой оболочки носа, уменьшения местного воспалительного процесса и предотвращения бактериальных инфекций верхних дыхательных путей.

Спрей назальный СНОТТИ ОРОШЕНИЕ (SNOTTY IRRIGATION) можно безопасно применять младенцам в возрасте от 3 месяцев, детям и взрослым.

Спрей назальный СНОТТИ ОРОШЕНИЕ (SNOTTY IRRIGATION) можно применять в период беременности и кормления грудью.

Спрей назальный СНОТТИ ОРОШЕНИЕ (SNOTTY IRRIGATION) эффективно удаляет агрессивные вещества и микроорганизмы, поступающие из внешней среды, и помогает предотвратить развитие бактериальных инфекций носа; поддерживает нормальные дыхательные функции носа.

Ксилитол является основным компонентом медицинского изделия. В условиях снижения pH он стабилизирует белковые структуры клеток. Благодаря осмолитическим свойствам регулирует солевой обмен на поверхности слизистой оболочки носа и носоглотки. Высокая концентрация ксилитола (11%) затрудняет адгезию (прилипание) микроорганизмов к клеткам слизистой оболочки, препятствует образованию биопленок, оказывает антимикробное влияние на некоторые виды патогенов.

Ксилитол разжижает и облегчает выведение слизи, удерживает влагу, благодаря чему увлажняет и успокаивает раздраженную слизистую оболочку носа, облегчает дыхание и улучшает качество сна у пациентов с острым и хроническим течением инфекционных и аллергических заболеваний полости носа, придаточных пазух и носоглотки. Наличие ксилитола обуславливает сладкий вкус.

Концентрация компонентов медицинского изделия обуславливает гипертоничность раствора, благодаря чему он помогает выводить избыток влаги и устранять отек слизистой оболочки носовых ходов и пазух.

Составляющие медицинского изделия не вступают в реакции с организмом человека и являются инертными по отношению к нему, не оказывают фармакологического, иммунобиологического и метаболического действия.

Спрей назальный СНОТТИ ОРОШЕНИЕ (SNOTTY IRRIGATION) применяется:

- для ежедневного гигиенического ухода, очищения и увлажнения слизистой оболочки носа;
- для облегчения разжижения назального секрета и его выведения из носа;
- для вымывания частиц пыли, аллергенов и микроорганизмов с поверхности слизистой носа;
- в комплексном лечении или с целью профилактики простуды, ОЗ, ОРВИ и других инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей, для очищения слизистой оболочки носа от инфекционных агентов и препятствования образованию бактериальных биопленок;
- для уменьшения заложенности и восстановления нормального функционирования верхних дыхательных путей при инфекционных и аллергических заболеваниях полости носа, придаточных пазух и носоглотки;
- для предотвращения развития бактериальных инфекций носа и придаточных пазух;
- для уменьшения признаков воспаления слизистой оболочки носа и придаточных пазух;
- в комплексном лечении аденоидов у детей;
- как уход за полостью носа после хирургических вмешательств, для восстановления физиологического состояния и функций слизистой оболочки.

Способ применения

Дозировка: по 1-3 впрыскивания в каждый носовой ход 2-3 раза в сутки. При необходимости кратность приема может быть увеличена. Длительность использования определяют индивидуально.

Использование детьми должно проходить под наблюдением или с помощью взрослых.

Перед первым использованием:

1. Снимите колпачок с насадки. Нажмите быстро на кнопку распыления, чтобы разрушить защитную перепонку первого открытия.
2. Сделайте 1-2 пробных нажатия в воздух, чтобы обеспечить достаточный поток или подобрать один из двух видов распыления, прокрутив верхушку распылителя.

Для проведения орошения или промывания носовых пазух у детей до 6 лет лучше выбрать положение насадки «мягкое распыление» («мелкодисперсный туман»).

Для детей старше 6 лет и взрослых рекомендованы следующие положения насадки: для орошения «мягкое распыление», для промывания «сильное распыление» (струя).

Способ применения:

1. Освободить носовые ходы от секрета.
2. Выбрать необходимый вид распыления, прокрутив верхушку распылителя.
3. Наклонить голову в сторону. Осторожно ввести насадку в верхнюю ноздрю. Удерживая баллон под любым углом, провести впрыскивание.
4. Наклонить голову в другую сторону и повторить процедуру с другой ноздрей.
5. Выровнять голову, чтобы облегчить отхождение слизи. Вытереть остатки жидкости бумажной салфеткой и, при необходимости, высморкаться.
6. После каждого использования промыть насадку теплой водой.

В случае неисправности следует прекратить использование и вернуть изделие в место, где оно было приобретено.

Ограничения, меры предосторожности и предупреждения

- Для использования только одним человеком.
- Не предназначено для детей в возрасте до 3 месяцев.
- Нельзя применять Спрей назальный СНОТТИ ОРОШЕНИЕ (SNOTTY IRRIGATION) при наличии у пациента гиперчувствительности к одному из компонентов изделия.
- После первых нескольких применений может возникнуть временное ощущение покалывания.
- Спрей назальный СНОТТИ ОРОШЕНИЕ (SNOTTY IRRIGATION) оставляет после себя естественный сладкий послевкусие.
- Не требует особых условий хранения.

Внимание! Емкость под давлением. Может взорваться при нагревании. Держать вдали от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить. Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Защищать от солнечных лучей. Не допускать воздействия температур свыше 50°C/122°F. Хранить в недоступном для детей месте.

Нестерильное медицинское изделие.

В случае серьезного инцидента, связанного с применением медицинского изделия Спрей назальный СНОТТИ ОРОШЕНИЕ (SNOTTY IRRIGATION), обратитесь к производителю по адресу quality@neomedis.com и в государственный орган здравоохранения.

Срок годности указан на упаковке.

Объем: 125 мл (ml)

Вместимость нетто: 125 мл (ml)

Масса нетто: 130 г (g)

Дата последнего пересмотра инструкции по применению: Апрель 2026.

ZLDF

Производитель и уполномоченные представители

Производитель:

Неомедис САРЛ

75016, Париж, ул. Раффе, 27-29 (ФРА) – Франция

Neomedis SARL

75016 PARIS - 27-29, RUE RAFFET (FRA) - France

Уполномоченный представитель в Украине:

ООО «Кратия Медтехника»

04107, г. Киев, ул. Багговутовская, д. 17-21, Украина

Тел.: 0 800 21-52-32

Электронная почта: uarep@cratia.ua

Импортер / Дистрибьютор:

ООО «ЮРИЯ-ФАРМ»

03038, Украина, город Киев, улица Николая Амосова,
дом 10